

THE BEST PARTNER OF DENTISTS



SINCE 1948



Сделано в Японии

Брекеты ортодонтические лигатурные

# COBY™

из диоксида циркония, в вариантах исполнения  
Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/19749 от 09.03.2023.



Каталог продукции  
ред. №2 Март 2025г.





# COBY™

## Содержание

Описание .....	2
Особенности .....	2-4
Описание составных частей .....	5
Варианты исполнения .....	6-12
- Брекеты COBY STRAIGHT .018" с прописью ROTH .....	6-9
- Брекеты COBY STRAIGHT .022" с прописью ROTH .....	9-12
- Брекеты COBY STANDARD .018" с прописью Edgewise --	12-13
Материалы для фиксации брекетов .....	14-15
Инструментарий ортодонтический .....	16-18

# COBY™



## БРЕКЕТЫ ИЗ ЦИРКОНОПОЛНЕННОЙ КЕРАМИКИ

### ОПИСАНИЕ

Брекеты ортодонтические лигатурные «COBY» из диоксида циркония, в вариантах исполнения (далее – брекеты) - сложные ортодонтические несъемные конструкции, применяющиеся для коррекции положения зубов человека при нарушениях прикуса и неровностях зубного ряда, аномалиях роста отдельных зубов, при наличии не прорезавшихся зубов, для улучшения эстетики лица и профиля, а также при подготовке к протезированию и корпусному перемещению зубов.

Представляют собой изделия, которые фиксируются при помощи ортодонтического клея (бондинга) на наружную поверхность зубов. Брекет имеет паз, в котором лежит ортодонтическая дуга, фиксирующаяся при помощи эластичных колечек – лигатур. Сопротивление этой дуги при её фиксации посредством брекетов и лигатур на искривлённых зубах — сила, которая медленно, но неуклонно выравнивает зубы и зубной ряд в полости рта.

### ОСОБЕННОСТИ

**6** Особенности  
**COBY™**  
 ZIRCONIA CERAMIC BRACKETS



Прочность  
и  
гибкость

Низкий  
профиль

Система  
фиксации  
лигатур

Адгезивное  
основание




Безопасное  
снятие

Эстетика




# 1 Превосходная прочность и гибкость

Высококачественный материал, позволяющий минимизировать риск возникновения поломок.

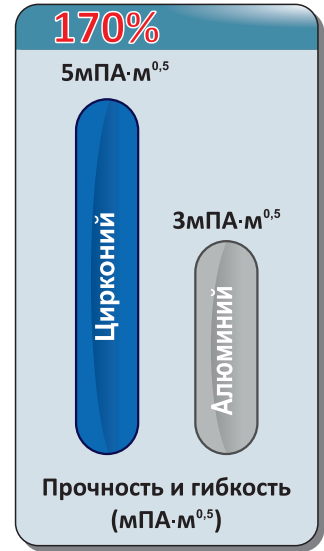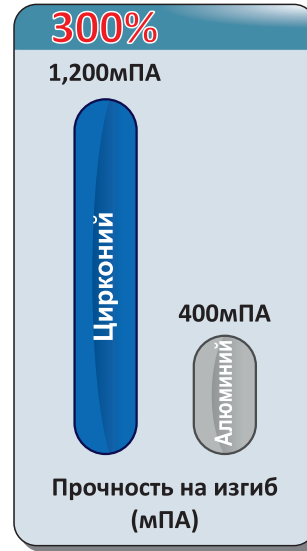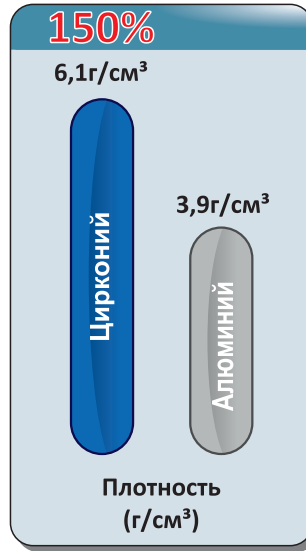


# 2 Низкий профиль

Циркононаполненная керамика обеспечивает низкий профиль и компактную форму для уменьшения окклюзионных нарушений.

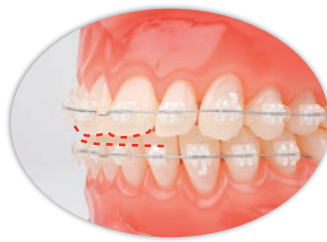

# 3 Система фиксации лигатур

На начальном этапе обеспечивает быстрый эффект. На промежуточном и завершающем этапах обеспечивает контроль торка.

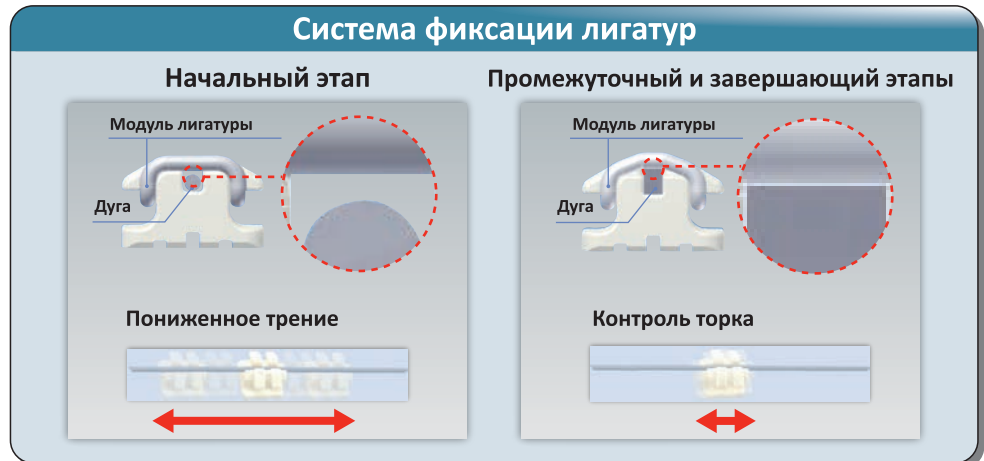

## 4 Адгезивное основание

Подходит для всех типов адгезивных связей.

Светоотверждение **OK**

Химическое отверждение **OK**


### Центральная часть



Дизайн поверхности основания брекета обеспечивает условия для оптимального сцепления брекета с поверхностью зуба и комфортного удаления брекета благодаря системе поднутрений/углублений разной глубины.

В центральной части основания созданы условия для максимальной силы сцепления брекета с эмалью зуба.


### Внешняя часть

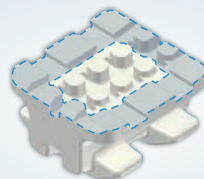

Внешняя часть основания спроектирована в виде системы неглубоких углублений/поднутрений для более легкого снятия брекета.


## 5 Безопасное снятие

Точки соприкосновения на мезиальных и дистальных углах основания обеспечивают ровное и безопасное снятие брекета без поломки.

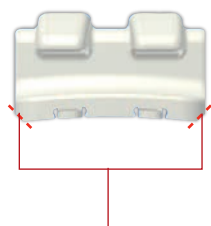

**Точка соприкосновения**

### Ровное снятие

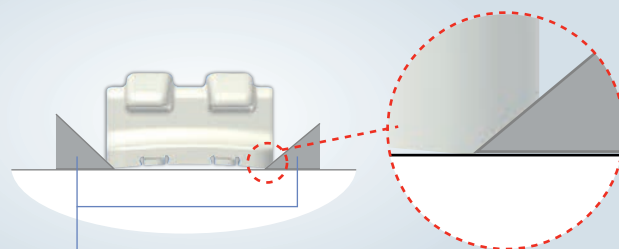

Инструмент для удаления

## 6 Эстетика

Соответствует естественным зубам.



### Оттенок



A1



COBY



A2

## Описание основных функциональных элементов (составных частей)

№ п/п	Наименование	Фотографическое изображение	Конструкционные особенности
1	Стандартные (Standard)		<p>Брекет имеет паз, в котором лежит ортодонтическая дуга, фиксирующаяся при помощи эластичных колечек – лигатур.</p>
2	Прямые (Straight)		
3	Прямые с крючком (Straight with hook)	 	
4	Основание брекета – Центральная часть		<p>Использование стандартных, прямых, или прямых с крючком брекетов – определяет стоматолог-ортодонт согласно клиническому случаю и назначенному лечению.</p> <p>Специфический наклон паза брекета по отношению к окклюзионной плоскости (торк и ангуляция) указывается в специальной прописи (РОТ, МБТ, Эджуайз и т.д.).</p> <p>Крючок на брежете необходим для того, чтобы при исправлении прикуса за него зацепить, например, цепочку, лигатуру или эластомер (стоматологическая резинка).</p>
	Основание брекета – Внешняя часть		<p>Дизайн поверхности основания брекета обеспечивает условия для оптимального сцепления брекета с поверхностью зуба и комфортного удаления брекета благодаря системе поднутрений / углублений разной высоты. В центральной части основания созданы условия для максимальной силы адгезии брекета с эмалью зуба.</p> <p>Внешняя часть основания спроектирована в виде системы невысоких углублений / поднутрений для более легкого удаления брекета.</p>

## Варианты исполнения брекетов COBY STRAIGHT .18

**Брекеты ортодонтические лигатурные «COBY» из диоксида циркония, в вариантах исполнения STRAIGHT .018:**


Паз		Артикул	Вариант исполнения	Зубы	Цвет. метка	Торк	Угол инкликации
<b>STRAIGHT .018" [.018" х .025" Пазы]</b> Для прописи POT (ROTH)	Верхние (10 шт.)	27800	STR-U1R-018	<u>1</u>	●	12	5
		27801	STR-U1L-018	<u>1</u>	●	12	5
27802		STR-U2R-018	<u>2</u>	●	8	9	
27803		STR-U2L-018	<u>2</u>	●	8	9	
27804		STR-U3R-018	<u>3</u>	●	-2	11	
27805		STR-U3L-018	<u>3</u>	●	-2	11	
27806		STR-U3R-018H	<u>3</u>	●	-2	11	
27807		STR-U3L-018H	<u>3</u>	●	-2	11	
27808		STR-U45-018	<u>54   45</u>	●	-7	0	
<b>Характеристика</b>  <b>Дуги с пониженным трением:</b> Круглая дуга .012" / .014" / .016" / .018" Прямоугольная дуга .016" х .016" <b>Дуги с контролем торка (ротации):</b> Прямоугольная дуга .016" х .022" .017" х .025" .018" х .025"		Нижние (10 шт.)	27811	STR-L12-018	<u>21   12</u>	-	0
	27813		STR-L3R-018	<u>3</u>	●	-11	7
	27814		STR-L3L-018	<u>3</u>	●	-11	7
	27815		STR-L3R-018H	<u>3</u>	●	-11	7
	27816		STR-L3L-018H	<u>3</u>	●	-11	7
	27817		STR-L4-018	<u>4   4</u>	●	-17	0
	27820		STR-L5-018	<u>5   5</u>	●	-22	0
	<b>Изображение</b>						

Артикул	Вариант исполнения	Фото	Положение		Зуб	Количество в уп., шт.
27800	STR-U1R-018		Верхний	Правый	Центральный резец (1)	10 штук
27801	STR-U1L-018		Верхний	Левый	Центральный резец (1)	10 штук
27802	STR-U2R-018		Верхний	Правый	Латеральный резец (2)	10 штук
27803	STR-U2L-018		Верхний	Левый	Латеральный резец (2)	10 штук
27804	STR-U3R-018		Верхний	Правый	Клык (3)	10 штук
27805	STR-U3L-018		Верхний	Левый	Клык (3)	10 штук
27806	STR-U3R-018H с крючком		Верхний	Правый	Клык (3)	10 штук
27807	STR-U3L-018H с крючком		Верхний	Левый	Клык (3)	10 штук
27808	STR-U45-018		Верхний	Правый / Левый	Первый премоляр (4) / Второй премоляр (5)	10 штук
27811	STR-L12-018		Нижний	Правый / Левый	Универсальный резец (1, 2)	10 штук

Артикул	Вариант исполнения	Фото	Положение		Зуб	Количество в уп., шт.
27813	STR-L3R-018		Нижний	Правый	Клык (3)	10 штук
27814	STR-L3L-018		Нижний	Левый	Клык (3)	10 штук
27815	STR-L3R-018H с крючком		Нижний	Правый	Клык (3)	10 штук
27816	STR-L3L-018H с крючком		Нижний	Левый	Клык (3)	10 штук
27817	STR-L4-018		Нижний	Правый / Левый	Первый премоляр (4)	10 штук
27820	STR-L5-018		Нижний	Правый / Левый	Второй премоляр (5)	10 штук

### Варианты исполнения брекетов COBY STRAIGHT .18 - наборы


	Артикул	Вариант исполнения	Зубы
Наборы	27880	STR-018-3-3	$\frac{3+3}{3+3}$
	27881	STR-018-3-3H ✖	
	27884	STR-018-5-5	$\frac{5+5}{5+5}$
	27885	STR-018-5-5H ✖	

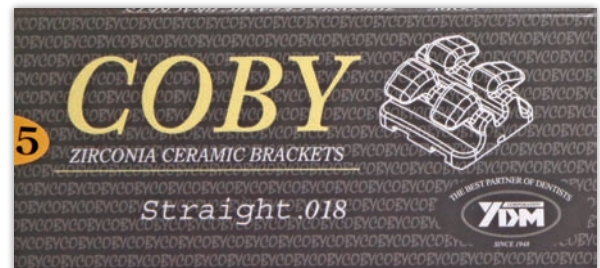

✖ Только UL3 с крючком

### Набор COBY STR-018-3-3

Артикул: 27880

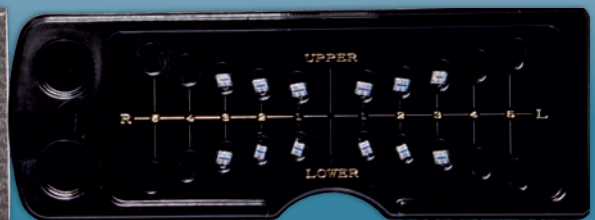



Вариант исполнения	Положение		Зуб	Количество в упаковке, шт.
STR-U1R-018	Верхний	Правый	Центральный резец (1)	1 шт.
STR-U1L-018	Верхний	Левый	Центральный резец (1)	1 шт.
STR-U2R-018	Верхний	Правый	Латеральный резец (2)	1 шт.
STR-U2L-018	Верхний	Левый	Латеральный резец (2)	1 шт.
STR-U3R-018	Верхний	Правый	Клык (3)	1 шт.
STR-U3L-018	Верхний	Левый	Клык (3)	1 шт.
STR-L12-018	Нижний	Правый/Левый	Универсальный резец (1, 2)	4 шт.
STR-L3R-018	Нижний	Правый	Клык (3)	1 шт.
STR-L3L-018	Нижний	Левый	Клык (3)	1 шт.

⚠ При заказе ориентируйтесь по артикулу.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставлений уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

## Набор COBY STR-018-3-3H


Артикул: 27881

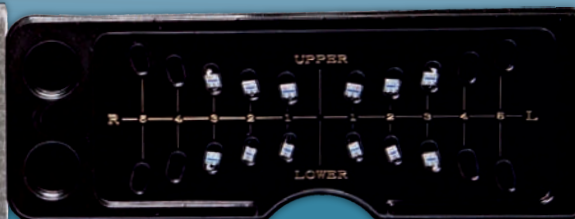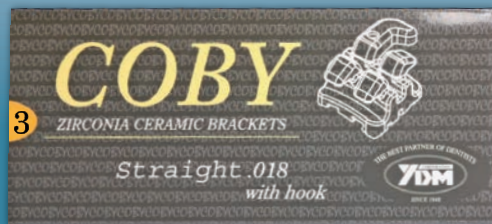

Вариант исполнения	Положение		Зуб	Количество в упаковке, шт.
STR-U1R-018	Верхний	Правый	Центральный резец (1)	1 шт.
STR-U1L-018	Верхний	Левый	Центральный резец (1)	1 шт.
STR-U2R-018	Верхний	Правый	Латеральный резец (2)	1 шт.
STR-U2L-018	Верхний	Левый	Латеральный резец (2)	1 шт.
STR-U3R-018H с крючком	Верхний	Правый	Клык (3)	1 шт.
STR-U3L-018H с крючком	Верхний	Левый	Клык (3)	1 шт.
STR-L12-018	Нижний	Правый/Левый	Универсальный резец (1, 2)	4 шт.
STR-L3R-018H с крючком	Нижний	Правый	Клык (3)	1 шт.
STR-L3L-018H с крючком	Нижний	Левый	Клык (3)	1 шт.

## Набор COBY STR-018-5-5



Артикул: 27884

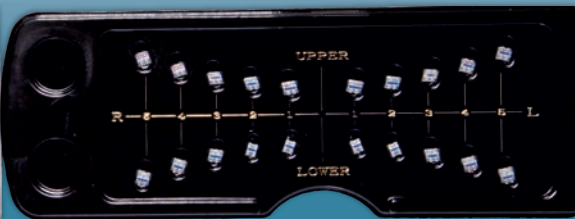

Вариант исполнения	Положение		Зуб	Количество в упаковке, шт.
STR-U1R-018	Верхний	Правый	Центральный резец (1)	1 шт.
STR-U1L-018	Верхний	Левый	Центральный резец (1)	1 шт.
STR-U2R-018	Верхний	Правый	Латеральный резец (2)	1 шт.
STR-U2L-018	Верхний	Левый	Латеральный резец (2)	1 шт.
STR-U3R-018	Верхний	Правый	Клык (3)	1 шт.
STR-U3L-018	Верхний	Левый	Клык (3)	1 шт.
STR-U45-018	Верхний	Правый/Левый	Первый премоляр (4) / Второй премоляр (5)	4 шт.
STR-L12-018	Нижний	Правый/Левый	Универсальный резец (1, 2)	4 шт.
STR-L3R-018	Нижний	Правый	Клык (3)	1 шт.
STR-L3L-018	Нижний	Левый	Клык (3)	1 шт.
STR-L4-018	Нижний	Правый/Левый	Первый премоляр (4)	2 шт.
STR-L5-018	Нижний	Правый/Левый	Второй премоляр (5)	2 шт.

## Набор COBY STR-018-5-5H

Артикул: 27885

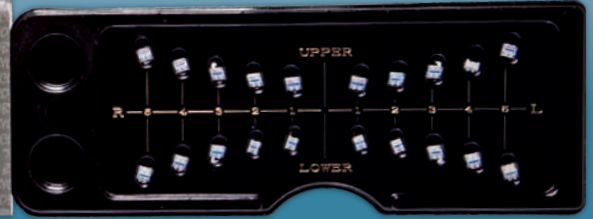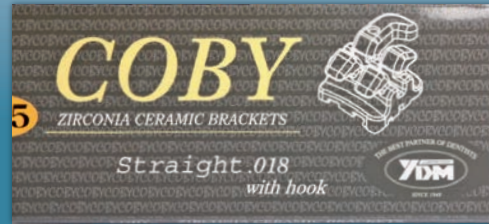

Вариант исполнения	Положение		Зуб	Количество в упаковке, шт.
STR-U1R-018	Верхний	Правый	Центральный резец (1)	1 шт.
STR-U1L-018	Верхний	Левый	Центральный резец (1)	1 шт.
STR-U2R-018	Верхний	Правый	Латеральный резец (2)	1 шт.
STR-U2L-018	Верхний	Левый	Латеральный резец (2)	1 шт.
STR-U3R-018H с крючком	Верхний	Правый	Клык (3)	1 шт.
STR-U3L-018H с крючком	Верхний	Левый	Клык (3)	1 шт.
STR-U45-018	Верхний	Правый/Левый	Первый премоляр (4) / Второй премоляр (5)	4 шт.
STR-L12-018	Нижний	Правый/Левый	Универсальный резец (1, 2)	4 шт.
STR-L3R-018H с крючком	Нижний	Правый	Клык (3)	1 шт.
STR-L3L-018H с крючком	Нижний	Левый	Клык (3)	1 шт.
STR-L4-018	Нижний	Правый/Левый	Первый премоляр (4)	2 шт.
STR-L5-018	Нижний	Правый/Левый	Второй премоляр (5)	2 шт.

### Варианты исполнения брекетов COBY STRAIGHT .022

**Брекеты ортодонтические лигатурные «COBY» из диоксида циркония, в вариантах исполнения STRAIGHT .022:**

Паз		Артикул	Вариант исполнения	Зубы	Цвет. метка	Торк	Угол инклинации
<b>STRAIGHT .022" [.022" x .028" Пазы]</b> Для прописи POT (ROTH)	Верхние (10 шт.)	27840	STR-U1R-022	<u>1</u>	●	12	5
		27841	STR-U1L-022	<u>1</u>	●	12	5
<b>Характеристика</b>		27842	STR-U2R-022	<u>2</u>	●	8	9
		27843	STR-U2L-022	<u>2</u>	●	8	9
<b>Дуги с пониженным трением:</b> Круглая дуга .012"/.014"/.016"/.018"/.020" Прямоугольная дуга .016" x .022" <b>Дуги с контролем торка (ротации):</b> Прямоугольная дуга .017" x .025"/ .018" x .025"/.019" x .025"/.021" x .025"/ .022" x .028"		27844	STR-U3R-022	<u>3</u>	●	-2	11
		27845	STR-U3L-022	<u>3</u>	●	-2	11
		27846	STR-U3R-022H	<u>3</u>	●	-2	11
		27847	STR-U3L-022H	<u>3</u>	●	-2	11
		27848	STR-U45-022	<u>54</u>   <u>45</u>	●	-7	0
		<b>Изображение</b>	Нижние (10 шт.)	27851	STR-L12-022	<u>21</u>   <u>12</u>	-
27853	STR-L3R-022			<u>3</u>	●	-11	7
27854	STR-L3L-022			<u>3</u>	●	-11	7
27855	STR-L3R-022H			<u>3</u>	●	-11	7
27856	STR-L3L-022H			<u>3</u>	●	-11	7
27857	STR-L4-022			<u>4</u>   <u>4</u>	●	-17	0
27860	STR-L5-022			<u>5</u>   <u>5</u>	●	-22	0


⚠ При заказе ориентируйтесь по артикулу.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставлений уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

Артикул	Вариант исполнения	Фото	Положение		Зуб	Количество в уп., шт.
27840	STR-U1R-022		Верхний	Правый	Центральный резец (1)	10 штук
27841	STR-U1L-022		Верхний	Левый	Центральный резец (1)	10 штук
27842	STR-U2R-022		Верхний	Правый	Латеральный резец (2)	10 штук
27843	STR-U2L-022		Верхний	Левый	Латеральный резец (2)	10 штук
27844	STR-U3R-022		Верхний	Правый	Клык (3)	10 штук
27845	STR-U3L-022		Верхний	Левый	Клык (3)	10 штук
27846	STR-U3R-022H с крючком		Верхний	Правый	Клык (3)	10 штук
27847	STR-U3L-022H с крючком		Верхний	Левый	Клык (3)	10 штук
27848	STR-U45-022		Верхний	Правый / Левый	Первый премоляр (4) / Второй премоляр (5)	10 штук
27851	STR-L12-022		Нижний	Правый / Левый	Универсальный резец (1, 2)	10 штук
27853	STR-L3R-022		Нижний	Правый	Клык (3)	10 штук
27854	STR-L3L-022		Нижний	Левый	Клык (3)	10 штук
27855	STR-L3R-022H с крючком		Нижний	Правый	Клык (3)	10 штук
27856	STR-L3L-022H с крючком		Нижний	Левый	Клык (3)	10 штук
27857	STR-L4-022		Нижний	Правый / Левый	Первый премоляр (4)	10 штук
27860	STR-L5-022		Нижний	Правый / Левый	Второй премоляр (5)	10 штук

### Варианты исполнения брекетов COBY STRAIGHT .022 - наборы


	Артикул	Вариант исполнения	Зубы
Наборы	27882	STR-022-3-3	$\frac{3+3}{3+3}$
	27883	STR-022-3-3H ✘	
	27886	STR-022-5-5	$\frac{5+5}{5+5}$
	27887	STR-022-5-5H ✘	

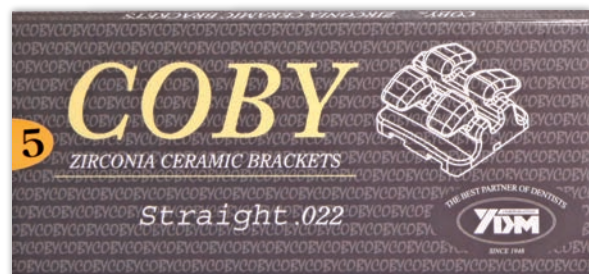

✘ Только UL3 с крючком

### Набор COBY STR-022-3-3


Артикул: 27882

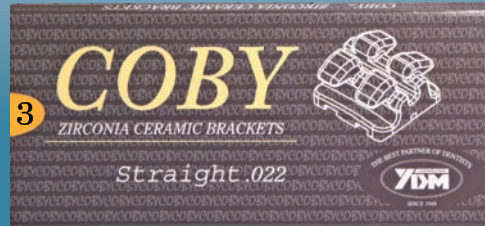

Вариант исполнения	Положение		Зуб	Количество в упаковке, шт.
STR-U1R-022	Верхний	Правый	Центральный резец (1)	1 шт.
STR-U1L-022	Верхний	Левый	Центральный резец (1)	1 шт.
STR-U2R-022	Верхний	Правый	Латеральный резец (2)	1 шт.
STR-U2L-022	Верхний	Левый	Латеральный резец (2)	1 шт.
STR-U3R-022	Верхний	Правый	Клык (3)	1 шт.
STR-U3L-022	Верхний	Левый	Клык (3)	1 шт.
STR-L12-022	Нижний	Правый/Левый	Универсальный резец (1, 2)	4 шт.
STR-L3R-022	Нижний	Правый	Клык (3)	1 шт.
STR-L3L-022	Нижний	Левый	Клык (3)	1 шт.

### Набор COBY STR-022-3-3H


Артикул: 27883

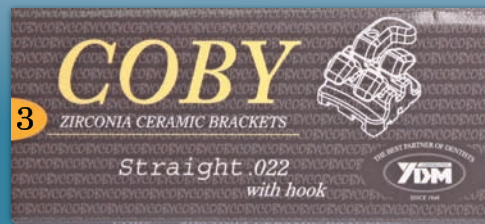

Вариант исполнения	Положение		Зуб	Количество в упаковке, шт.
STR-U1R-022	Верхний	Правый	Центральный резец (1)	1 шт.
STR-U1L-022	Верхний	Левый	Центральный резец (1)	1 шт.
STR-U2R-022	Верхний	Правый	Латеральный резец (2)	1 шт.
STR-U2L-022	Верхний	Левый	Латеральный резец (2)	1 шт.
STR-U3R-022H с крючком	Верхний	Правый	Клык (3)	1 шт.
STR-U3L-022H с крючком	Верхний	Левый	Клык (3)	1 шт.
STR-L12-022	Нижний	Правый/Левый	Универсальный резец (1, 2)	4 шт.
STR-L3R-022H с крючком	Нижний	Правый	Клык (3)	1 шт.
STR-L3L-022H с крючком	Нижний	Левый	Клык (3)	1 шт.

### Набор COBY STR-022-5-5

Артикул: 27886

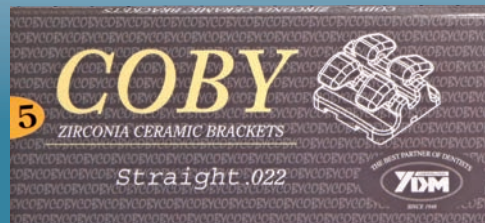

Вариант исполнения	Положение		Зуб	Количество в упаковке, шт.
STR-U1R-022	Верхний	Правый	Центральный резец (1)	1 шт.
STR-U1L-022	Верхний	Левый	Центральный резец (1)	1 шт.

Продолжение состава набора на следующей странице.


При заказе ориентируйтесь по артикулу.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставления уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

STR-U2R-022	Верхний	Правый	Латеральный резец (2)	1 шт.
STR-U2L-022	Верхний	Левый	Латеральный резец (2)	1 шт.
STR-U3R-022	Верхний	Правый	Клык (3)	1 шт.
STR-U3L-022	Верхний	Левый	Клык (3)	1 шт.
STR-U45-022	Верхний	Правый/Левый	Первый премоляр (4) / Второй премоляр (5)	4 шт.
STR-L12-022	Нижний	Правый/Левый	Универсальный резец (1, 2)	4 шт.
STR-L3R-022	Нижний	Правый	Клык (3)	1 шт.
STR-L3L-022	Нижний	Левый	Клык (3)	1 шт.
STR-L4-022	Нижний	Правый/Левый	Первый премоляр (4)	2 шт.
STR-L5-022	Нижний	Правый/Левый	Второй премоляр (5)	2 шт.

### Набор COBY STR-022-5-5H

Артикул: 27887

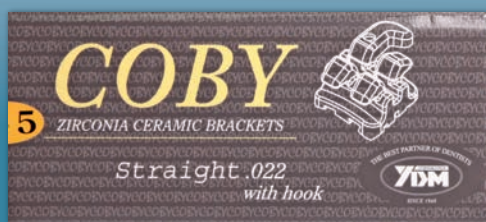

Вариант исполнения	Положение		Зуб	Количество в упаковке, шт.
STR-U1R-022	Верхний	Правый	Центральный резец (1)	1 шт.
STR-U1L-022	Верхний	Левый	Центральный резец (1)	1 шт.
STR-U2R-022	Верхний	Правый	Латеральный резец (2)	1 шт.
STR-U2L-022	Верхний	Левый	Латеральный резец (2)	1 шт.
STR-U3R-022H с крючком	Верхний	Правый	Клык (3)	1 шт.
STR-U3L-022H с крючком	Верхний	Левый	Клык (3)	1 шт.
STR-U45-022	Верхний	Правый/Левый	Первый премоляр (4) / Второй премоляр (5)	4 шт.
STR-L12-022	Нижний	Правый/Левый	Универсальный резец (1, 2)	4 шт.
STR-L3R-022H с крючком	Нижний	Правый	Клык (3)	1 шт.
STR-L3L-022H с крючком	Нижний	Левый	Клык (3)	1 шт.
STR-L4-022	Нижний	Правый/Левый	Первый премоляр (4)	2 шт.
STR-L5-022	Нижний	Правый/Левый	Второй премоляр (5)	2 шт.

### Варианты исполнения брекетов COBY STANDARD .018

#### Брекеты ортодонтические лигатурные «COBY» из диоксида циркония, в вариантах исполнения STANDARD .018:

Паз		Артикул	Вариант исполнения	Зубы	Цвет. метка	Торк	Угол инклинации
STANDARD .018" [.018" x .025" Пазы] Для прописи ЭДЖУЙС (EDGEWISE)	Верхние и Нижние (10 шт.)	27870	STD-U1-018	<u>1 1</u>	-	0	0
		27871	STD-U2-018	<u>2 2</u>	-	0	0
		27872	STD-345-018	<u>543 345</u> <u>543 345</u>	-	0	0
		27873	STD-L12-018	<u>21 12</u>	-	0	0
Изображение	Набор	27890	STD-018-3-3	<u>3+3</u> <u>3+3</u>	-	-	-
		27892	STD-018-5-5	<u>5+5</u> <u>5+5</u>	-	-	-
<b>Характеристика</b>							
Дуги с пониженным трением: Круглая дуга .012" / .014" / .016" / .018" Прямоугольная дуга .016" x .016" <b>Дуги с контролем торка (ротации):</b> Прямоугольная дуга .016" x .022" / .017" x .025" / .018" x .025"							

⚠ При заказе ориентируйтесь по артикулу.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставлений уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

Артикул	Вариант исполнения	Фото	Положение		Зуб	Количество в уп., шт.
27870	STD-U1-018		Верхний	Правый/ Левый	Центральный резец (1)	10 штук
27871	STD-U2-018		Верхний	Правый/ Левый	Латеральный резец (2)	10 штук
27872	STD-345-018		Верхний/ Нижний	Правый/ Левый	Клык (3)	10 штук
27873	STD-L12-018		Нижний	Правый/ Левый	Универсальный резец (1, 2)	10 штук

### Набор COBY STD-018-3-3

Артикул: 27890




Вариант исполнения	Положение		Зуб	Количество в упаковке, шт.
STD-U1-018	Верхний	Правый/Левый	Центральный резец (1)	2 шт.
STD-U2-018	Верхний	Правый/Левый	Латеральный резец (2)	2 шт.
STD-345-018 (только клыки (3))	Верхний / Нижний	Правый/Левый	Клык (3)	4 шт.
STD-L12-018	Нижний	Правый/Левый	Универсальный резец (1, 2)	4 шт.

### Набор COBY STD-018-5-5

Артикул: 27892



Вариант исполнения	Положение		Зуб	Количество в упаковке, шт.
STD-U1-018	Верхний	Правый/Левый	Центральный резец (1)	2 шт.
STD-U2-018	Верхний	Правый/Левый	Латеральный резец (2)	2 шт.
STD-345-018	Верхний / Нижний	Правый/Левый	Клык (3), Первый премоляр (4), Второй премоляр (5)	12 шт.
STD-L12-018	Нижний	Правый/Левый	Универсальный резец (1, 2)	4 шт.

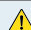 При заказе ориентируйтесь по артикулу.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставлений уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

## Материалы для фиксации брекетов, представление компании YAMAKIN Япония



Компания **YAMAKIN CO., LTD.**, Япония, с 2006 г. является производителем технических и врачебных композитных материалов для прямых и непрямых реставраций, адгезивов, керамических масс. Мы представляем Вам современные пломбировочные композитные материалы **iGOS** и **Z Fill 10**. - для высокоэстетичной фиксации брекетов **YDM COBY**, адгезивы **iGOS-BOND** и **Aqua Bond 0** с высокой адгезией во влажной среде - для надежного сцепления эмали зуба с композитным материалом, гель для травления и очищения **Multi Etchant** - для подготовки поверхности зуба к нанесению адгезива.

### Краткое описание материалов для фиксации брекетов (YAMAKIN Япония)

**Multi-Etchant (гель для травления и очищения):** Универсальный протравливающий агент для циркония, керамики, стеклокерамики, композитов, сплавов драгоценных и недрагоценных металлов, эмали и дентина.  
**iGOS-BOND / AQUA BOND 0:** Жидкие бондинги с высокой степенью адгезии во влажной среде. Для прямых реставраций фронтальных и жевательных зубов, пломбировки полостей всех типов, ремонта сколов, керамических коронок и мостов, надежного сцепления эмали зуба с композитным материалом.  
**iGOS / Z Fill 10.:** Материалы стоматологические пломбировочные, цирконосодержащие, светоотверждаемые, композитные на основе субмикронного керамического кластерного наполнителя, для высокоэстетичной фиксации брекетов **YDM COBY**

### СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ



## Описание материалов для фиксации брекетов (YAMAKIN Япония)

### Multi Etchant



**Фасовка:** шприц в индивидуальной упаковке 2мл - 1 шт. в составе Одноразовая канюля Needle Tip 5шт. **Вес:** 2мл. **Артикул:** 00092801

**Универсальный протравливающий агент для циркония, керамики, стеклокерамики, композитов, сплавов драгоценных и недрагоценных металлов, эмали и дентина.**

Гель для травления и очищения Multi Etchant не содержит фосфорной кислоты. В нем содержится адгезивный фосфатный мономер (11 - Метакрилоилокси тетраэтиленгликоль дигидрофосфат, М-ТЕГ-Р), разработанный компанией YAMAKIN, благодаря чему Multi Etchant может использоваться для очистки различных типов материалов, таких как керамика, металлы и композиты. Multi Etchant - это мягкий травильный материал, который можно использовать как с эмалью, так и с дентином. Кроме того, он также обладает свойством сильного связующего агента для циркония, создавая эффект праймера.



### iGOS-BOND

**Фасовка:** флакон в индивидуальной упаковке 5мл - 1 шт. **Вес:** 5мл. **Артикул:** 40300101

**Бондинг жидкий iGOS-Bond с высокой степенью адгезии во влажной среде**

Для прямых реставраций фронтальных и жевательных зубов, пломбировки полостей всех типов, ремонта сколов, керамических коронок и мостов.

Зубной адгезив для эмали или дентина, достигающий высокой адгезии в ротовой полости при влажных условиях. При использовании iGOS-BOND совместно со связывающим материалом Multi Primer Liquid (ПУ № РЗН 2016/3740) можно добиться адгезии с широким диапазоном материалов таких, как цирконий, титан, сплавы драгоценных и недрагоценных металлов, стоматологическая керамика и композитные материалы.



### TMR AQUA BOND 0

**Фасовка:** флакон в индивидуальной упаковке 5мл - 1 шт. **Вес:** 5мл. **Артикул:** 40700001

**Бондинг жидкий TMR-AQUA BOND 0 с высокой степенью адгезии во влажной среде.**

Для прямых реставраций фронтальных и жевательных зубов, пломбировки полостей всех типов, ремонта сколов, керамических коронок и мостов.

Зубной адгезив для эмали или дентина, достигающий высокой адгезии в ротовой полости при влажных условиях. При использовании TMR-AQUA BOND 0 совместно со связывающим материалом Multi Primer Liquid (ПУ № РЗН 2016/3740) можно добиться адгезии с широким диапазоном материалов таких, как цирконий, титан, сплавы драгоценных и недрагоценных металлов, стоматологическая керамика и композитные материалы.

### TMR Z-Fill 10.



**Фасовка:** шприц в индивидуальной упаковке 2,6 г (1,5 мл) - 1 шт. в составе Одноразовая канюля Needle Tip 10шт. **Вес:** 2,6 г (1,5 мл).

**TMR Z-Fill 10. Low Flow - текучий**

**Материал стоматологический пломбировочный «TMR Z-Fill 10. Low Flow», цирконосодержащий, светоотверждаемый, композитный на основе субмикронного керамического кластерного наполнителя, текучий**

#### Базовые оттенки



#### Опаковые оттенки



#### Отбеливание



#### Эмаль



#### LOWFLOW

- На расцветке представлены фотографии слоев композитов толщиной в 1 мм.
- Оттенок зависит от толщины слоя композита и цвета фона

### iGOS



**Фасовка:** шприц в индивидуальной упаковке 2,6 г (1,5 мл) - 1 шт. в составе Одноразовая канюля Needle Tip 10шт. **Вес:** 2,6 г (1,5 мл).

**iGOS Low Flow - текучий**

**Материал стоматологический пломбировочный «iGOS Low Flow», цирконосодержащий, светоотверждаемый, композитный на основе субмикронного керамического кластерного наполнителя, текучий**


#### Базовые оттенки



#### Опаковые оттенки



#### Отбеливание

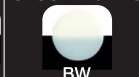

#### Эмаль



#### LOWFLOW

- На расцветке представлены фотографии слоев композитов толщиной в 1 мм.
- Оттенок зависит от толщины слоя композита и цвета фона

⚠ При заказе ориентируйтесь по артикулу.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставления уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

**Инструментарий ортодонтический (YDM Япония)**


**ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРЕЗКИ И УДЕРЖАНИЯ ПРОВОЛОКИ**



**Артикул: 27606**

**Описание:** Отрезает и удерживает дистальный конец дугообразной проволоки. Вставки из цементированного карбида обеспечивают высокую производительность и длительный срок службы наконечников инструмента.

**РЕЗАК ДЛЯ ШТИФТОВ И ЛИГАТУР**

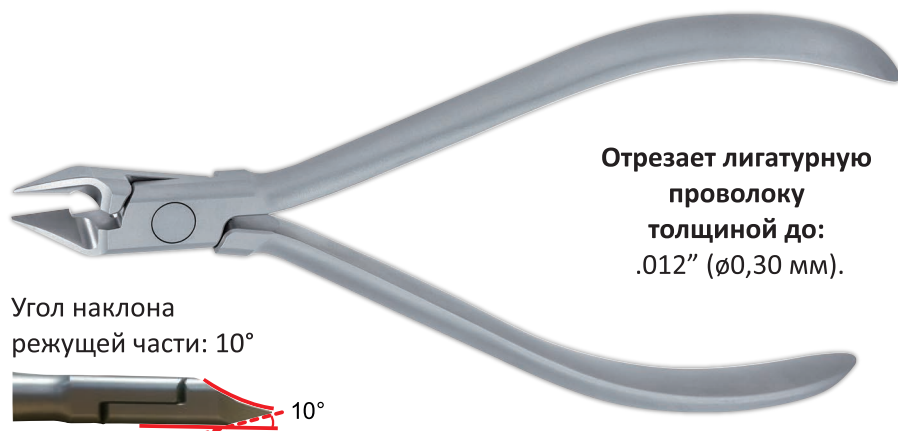

**Артикул: 27605**

**Описание:** Отрезает лишнюю лигатурную проволоку. Вставки из твердого материала обеспечивают перерезание лигатурной проволоки и эластика избегая поломки. Угол наклона 10° и тонкий изгиб обеспечивают легкий доступ как к передним, так и к коренным зубам.

**ГИБОЧНЫЕ ПЛОСКОГУБЦЫ**




**Артикул: 27418**

**Описание:** Наконечник формы "птичий клюв". Согните фиксирующую проволоку, защелкните.

## Инструментарий ортодонтический (YDM Япония)

### ГИБОЧНЫЕ ПЛОСКОГУБЦЫ

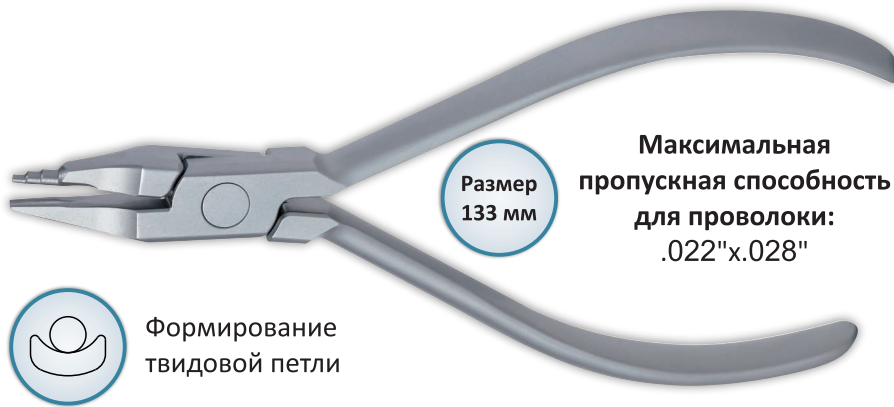

Размер  
133 мм

Максимальная  
пропускная способность  
для проволоки:  
.022"x.028"



Формирование  
твидовой петли

**Артикул: 27416**

**Описание:** Круглый клюв имеет форму 3 слоев цилиндров для формирования твидовой петли (диаметром 1,25 мм, 1,85 мм, 2,26 мм), которые можно использовать для замыкания винтовой петли, спиральной петли, омега-петли.

### ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ ОКАНТОВКИ




Снятие ленты

**Артикул: 27443**

**Описание:** Используются для снятия ленты. Матовая поверхность позволяет избежать отражения от плоскогубцев при ярком освещении.

### КУСАЧКИ ДЛЯ ПРОВОЛОКИ

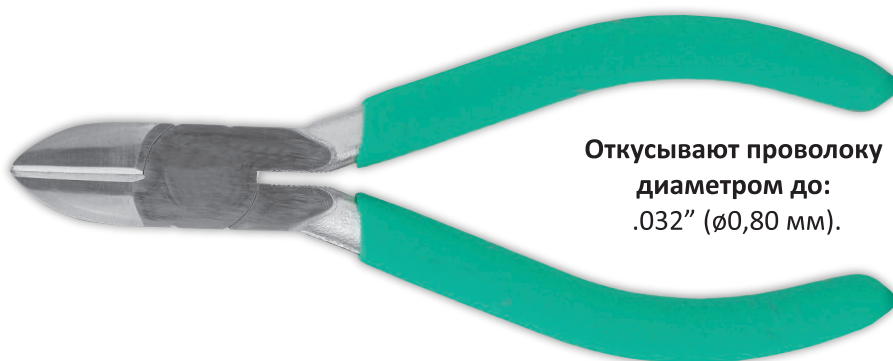

Откусывают проволоку  
диаметром до:  
.032" (ø0,80 мм).

**Артикул: 22601**

**Описание:** Кусачки для фиксирующей проволоки, проволоки для застёжек.

При заказе ориентируйтесь по артикулу.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставлений уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

Инструментарий ортодонтический (YDM Япония)

ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ



Форма края плоскогубцев



**Артикул: 22506**

**Описание:** Плоскогубцы для привязывания лигатурной проволоки к кронштейну.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УСТАНОВКИ И СНЯТИЯ ЛИГАТУР



**Артикул: 22754**

**Описание:** Используются для установки и снятия лигатур. Привяжите лигатурную проволоку к кронштейну в форме крыла. С помощью одного инструмента выполняются две функции - заправка и завязывание.







THE BEST PARTNER OF DENTISTS



SINCE 1948

COBY™



Atri

стоматологические материалы

ТОО «АТРИ»

г. Алматы, ул. Макатаева 117, лит А,  
офис 424 (Бизнес-центр "LOTOS").  
Тел. городской: +7 (727) 339-05-72  
Тел. сотовый: +7 (771) 747-99-05  
(WhatsApp)  
E-mail: shop@atri.kz, Сайт: www.atri.kz



Ред. №2 Март 2025г.

